

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – GRUPA CERVİKALNE ORTOZE

ML-0626, ML-0710, ML-0711, ML-0712, ML-0713, ML-0714, ML-0716, ML-0990, ML-1004

Nelson ortoza, cervikalna: Preporučuje se upotreba kod hernije cervikalnog diska, zaštitu nakon trauma, ukočenosti cervikalnih mišića.

Plastična ortoza, cervikalna: Preporučuje se upotreba kod hernije cervikalnog diska, zaštitu nakon trauma, ukočenosti cervikalnih mišića.

Cervikalna ortoza, mekana: Preporučuje se upotreba kod hernije cervikalnog diska, zaštitu nakon trauma, ukočenosti cervikalnih mišića.

Filadelfija ortoza, za imobilizaciju, cervikalna: Preporučuje se upotreba kod hernije cervikalnog diska, zaštitu nakon trauma, ukočenosti cervikalnih mišića.

Filadelfija ortoza, za imobilizaciju, cervikalna, sa otvorom za traheostomu: Koristi se u slučajevima traheostomije.

Cervikalna ortoza, za hitnu pomoć: Plastična unutrašnja strana je obložena mekim penastim materijalom. Moguća su 3 nivoa podešavanja visine sa sistemom sigurnosne brave. Otvor za traheju omogućava praćenje pulsa i hitne traheostomije. Otvor na zadnjoj strani omogućava proveravanje zadnjeg cervikalnog područja. Penasti materijal je takođe radiolucentan što omogućava rendgen, moguće je koristiti CT, MRI. Ortoza je u komadu i spremna za upotrebu.

Cervikalna ortoza, žičani ram: Polutvrda ortoza za vrat dizajnirana prema anatomskom obliku vrata, pružajući maksimalnu podršku vratu. Prednji deo je izrađen od aluminijumskog rama koji omogućava podešavanje fleksije i ekstenzije, a zadnji potiljačni deo je od polietilenskog materijala. Jednostavan je za upotrebu, lagan i udoban. Visina i obim se mogu individualno podesiti ručnim savijanjem.

Cellintro ortoza, cervikalna: Preporučuje se upotreba kod hernije cervikalnog diska, mišićne spazme i traume. Upija i propušta vlagu. Sprečava pojavu grinja. Dobija se nanošenjem Tencel praha u sunđer, a čestice Tencel se dobijaju od drveta koje je prirodni materijal. Tencel puder brzo otpušta nakupljenu vlagu. Prekrivena je antibakterijskom tkaninom.

Ortoza Minerva: Minerva je dizajnirana da podrži / imobilize vratnu kičmu i gornje delove grudne kičme.

SAVETI I UPOZORENJA

- Ovaj proizvod koristiti samo uz savet lekara.
- Ovaj proizvod se ne može koristiti u druge svrhe od onih za koje je namenjen i ne može se koristiti sa drugim proizvodima.
- Ukoliko imate alergiju na lateks ili gumu, molimo proverite komponente proizvoda i u tom slučaju nosite pamučni donji veš koji će upijati znoj i vlagu.
- Naša firma ima pravo da vrši modifikacije na proizvodu bez prethodnih obaveštenja kupaca.

INSTRUKCIJE ZA PRANJE

- Ne perite u veš mašini.
- Perite ručno na temperaturi ispod 40 stepeni.
- Ne koristite deterdžent.
- Nemojte peglati proizvod.
- Nakon pranja, dobro osušite pre upotrebe.

SAVETI ZA UPOTREBU

- Uverite se da je veličina proizvoda odgovarajuće veličine za vas.
- Nakon što postavite ortoza u odgovarajući položaj, sastavite čičak trake.
- Otvorite čičak trake, ako ih ima, i pritegnite ih.



BEYAZGRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Başkent O.S.B 19.Cad. No :24 Malıköy Sincan- ANKARA - TÜRKİYE
Tel : +90 312 434 12 32 Fax : +90 312 434 12 33 e-mail : beyazgrup@beyazgrup.org

Caution	Consult instructions for use	Keep away from heat	Catalogue number	Do not use if package is damaged	Manufactured by	Use by date	Non Sterile	Latex Free
			REF					



Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer u RS:

ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT DOO, Ustanička 234A, Beograd, telefoni: maloprodaja 011/7621-952, veleprodaja i servis 011/7621-953; email: info@ortopedija.co.rs; www.ortopedija-novizivot.co.rs

Broj rešenja o registraciji: 000003727 2024 59010 009 000 515 059 04 003 od 11.01.2024. godine

PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, u roku od 6 meseci od datuma kupovine.

Uz prigovor se OBAVEZNO podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda ili povraćaj plaćenog iznosa samo ukoliko proizvod nije korišćen, nije oštećen ni na koji način i u originalnom je pakovanju. Prodavac će detaljno pregledati proizvod i utvrditi ispunjenost svih uslova za prihvatanje prigovora.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom.