

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – GRUPA PROIZVODA ZA SKOČNI ZGLOB

ML-0141, ML-0365, ML-0400, ML-0404, ML-0405, ML-0407, ML-0408, ML-0412, ML-0413 , ML-0552, ML-0563, ML-0604, ML-0605, ML-0624

Steznik za skočni zglob: Pruža toplotu i podršku skočnom zglobo. Pruža stabilnost kod blažih uganuća.

Steznik za skočni zglob sa silikonskim jastučetom: Pruža masažu uz pomoć silikonskog jastučeta kako bi se povećala cirkulacija kod uganuća, pomaže kod lečenja hematoma i edema.

Steznik za skočni zglob sa trakama: Pruža toplotu i podršku skočnom zglobo kod blažih bolova.

Steznik za skočni zglob sa plastičnom podrškom: Pruža jaču stabilnost skočnom zglobo uz pomoć plastične podrške umetnute u području gležnja.

Ortoza za Hallux valgus (čukljeve): Pomaže držanje prstiju u istoj ravni, za noćnu upotrebu.

Splint za Hallux valgus (čukljeve): Za stabilizaciju i tretman nakon operacija.

Elastični steznik za skočni zglob: Za umerena i teža uganuća, za imobilizaciju usled drugih povreda skočnog zgloba i stopala.

Ortoza za imobilizaciju skočnog zgloba: To je ortoza koja se koristi kod tegoba u donjem delu stopala i pomaže u održavanju zgloba stopala u željenom stepenu.

Steznik za skočni zglob, osmica: Pruža toplotu i podršku skočnom zglobo. Pruža stabilnost kod blažih uganuća.

Aircast steznik za skočni zglob: Anatomski pristaje odlično i pruža maksimalnu stabilnost skočnom zglobo, uz podršku sa obe strane.

Steznik za potkolenicu: Kada je potrebna zaštita tibijalne kosti. Pruža toplotu i kompresiju u slučaju povreda mišića.

Steznik za natkolenicu: Pruža toplotu i kompresiju kvadricepsu i mišićima aduktora.

Pojas za ingvinalnu kilu: Za jednostranu ili obostranu kilu.

Steznik za skočni zglob i ligamente: Pruža toplotu i podršku skočnom zglobo. Pruža stabilnost kod blažih uganuća.

Achilles steznik za skočni zglob: Nakon operacije i hroničnih oboljenja ahilove tetive.

Cipela posle operacije čukljeva: Efikasan u smanjenju edema i ubrzanju procesa zarastanja. Dugačak čičak omogućava personalizovanu upotrebu željene širine i zategnutosti.

AFO ortoza: Omogućava odmor stopala i skočnog zgloba u više položaja.

Peronalna ortoza: Sprečava trenje tako što drži stopalo i zglob stopala u funkcionalnom položaju.

SAVETI I UPOZORENJA

- Ovaj proizvod koristiti samo uz savet lekara.
- Ovaj proizvod gubi svoje karakteristike na visokim temperaturama.
- Ukoliko želite da napravite modifikacije radi lakše upotrebe, posavetujte se sa lekarom ili na prodajnom mestu na kom ste kupili proizvod.
- Ovaj proizvod se ne može koristiti u druge svrhe od onih za koje je namenjen i ne može se koristiti sa drugim proizvodima.
- Savetuje se da se proizvodi od neprena koriste 3-4 sata po ciklusu. Za druge materijale savetuje se da se ne nose duže od 8 sati (osim ako lekar nije drugačije preporučio).
- Ukoliko imate alergiju na lateks ili gumu, molimo proverite komponente proizvoda i u tom slučaju nosite pamučni donji veš koji će upijati znoj i vlagu.
- Naša firma ima pravo da vrši modifikacije na proizvodu bez prethodnih obaveštenja kupaca.
- Ne perite u veš mašini. Perite ručno na temperaturi ispod 40 stepeni i ne koristite deterdžent.
- Nemojte peglati proizvod. Nakon pranja, dobro osušite pre upotrebe.



BEYAZGRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Başkent O.S.B. 19.Cad. No :24 Malıköy Sincan- ANKARA - TÜRKİYE
Tel : +90 312 434 12 32 Fax : +90 312 434 12 33 e-mail : beyazgrup@beyazgrup.org

Caution	Consult instructions for use	Keep away from sunlight	Catalogue number	Do not use if package is damaged	Manufactured by	Use by date	Non Sterile	Late Free



Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer u RS:

ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT DOO, Ustanička 234A, Beograd, telefoni: maloprodaja 011/7621-952, veleprodaja i servis 011/7621-953; email: info@ortopedija.co.rs; www.ortopedija-novizivot.co.rs

Broj rešenja o registraciji: 000003727 2024 59010 009 000 515 059 04 003 od 11.01.2024. godine

PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, u roku od 6 meseci od datuma kupovine.

Uz prigovor se **OBAVEZNO** podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda ili povraćaj plaćenog iznosa samo ukoliko proizvod nije korišćen, nije oštećen ni na koji način i u originalnom je pakovanju. Prodavac će detaljno pregledati proizvod i utvrditi ispunjenost svih uslova za prihvatanje prigovora.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom.