

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – GRUPA PROIZVODA ZA ZGLOB ŠAKE

ML-0101, ML-0102, ML-0110, ML-0111, ML-0113, ML-0118, ML-0119, ML-0121, ML-0122, ML-0124, ML-0125, ML-0126, ML-0130, ML-0131, ML-0140, ML-0311, ML-0323, ML-0603

Steznik za zglob šake: Obezbeđuje imobilizaciju ručnog zgloba u bolnoj situaciji. Sprečava pomeranje ručnog zgloba uz pomoć aluminijumske podrške.

Steznik za zglob šake sa podrškom za palac: Obezbeđuje stabilizaciju u slučaju sindroma karpalnog i metakarpalnog tunela i bola u zglobu šake.

Steznik za palac: Pruža podršku i stabilizuje zglob palca.

Ortoza za imobilizaciju ruke: Stabilizuje ruku u jednom položaju i imobilizuje rame.

Ortoza za imobilizaciju ruke, pod uglom: Za lečenje kod povreda mišića ramena. Omogućava imobilizaciju ruke pod uglom od 30, 45 ili 60 stepeni, nakon otvorene i artroskopske operacije.

Ortoza za pravilno držanje ramena: Omogućava imobilizaciju ključne kosti nakon povrede.

Steznik za rame: Pruža odličnu imobilizaciju ramena i nadlaktice kod preloma, kao i kod dislokacije ramena.

Steznik za teniski lakat: Koristi se za tretman teniskog lakta. Smanjuje opterećenje na tetivu uz pomoć kompresije.

Steznik za lakat: Koristi se kod sindroma teniskog lakta. Pruža toplotu i podršku zglobu lakta.

Ortoza za imobilizaciju prsta: Dizajniran je da imobilizira i ručni zglob i mali prst, napravljen od neoprena koji se može zalepiti za čičak trakom sa svake strane. Aluminijumska podrška se nalazi unutar bočnog džepa kako bi prsti bili u fiksnom položaju. Proizvodi se u jednoj veličini. Koristi se kod preloma malog prsta i deformiteta prstiju.

Steznik za rame: Pruža zaštitu i toplotu ramenu, u slučaju hroničnih bolova, sportskih povreda i kada je rame izloženo stresovima.

Steznik za zglob šake-traka: Pruža podršku i zaštitu kod bolova koji se javljaju tokom sportskih aktivnosti.

Dorzofleksiona ortoza za ručni zglob: Obezbeđuje položaj zgloba u dorzalnoj fleksiji od 30 stepeni i IP zglobova u blagoj fleksiji. Koristi se za prevenciju kontrakura.

Ortoza za lakat sa ROM-om: Koristi se za imobilizaciju kod dislokacije lakta.

SAVETI I UPOZORENJA

- Ovaj proizvod koristiti samo uz savet lekara.
- Ovaj proizvod gubi svoje karakteristike na visokim temperaturama.
- Ukoliko želite da napravite modifikacije radi lakše upotrebe, posavetujte se sa lekarom ili na prodajnom mestu na kom ste kupili proizvod.
- Ovaj proizvod se ne može koristiti u druge svrhe od onih za koje je namenjen i ne može se koristiti sa drugim proizvodima.
- Savetuje se da se proizvodi od neprena koriste 3-4 sata po ciklusu. Za druge materijale savetuje se da se ne nose duže od 8 sati (osim ako lekar nije drugačije preporučio).
- Ukoliko imate alergiju na lateks ili gumu, molimo proverite komponente proizvoda i u tom slučaju nosite pamučni donji veš koji će upijati znoj i vlagu.
- Naša firma ima pravo da vrši modifikacije na proizvodu bez prethodnih obaveštenja kupaca.

INSTRUKCIJE ZA PRANJE

- Ne perite u veš mašini. Perite ručno na temperaturi ispod 40 stepeni.
- Ne koristite deterđent.
- Nemojte peglati proizvod.
- Nakon pranja, dobro osušite pre upotrebe.



BEYAZGRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Başkent O.S.B 19.Cad. No :24 Malıköy Sincan- ANKARA - TÜRKİYE
Tel : +90 312 434 12 32 Fax : +90 312 434 12 33 e-mail : beyazgrup@beyazgrup.org

Caution	Consult instructions for use	Keep away from sunlight	Catalogue number	Do not use if package is damaged	Manufactured by	Use by date	Non Sterile	Latex Free
			REF					



Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer u RS:

ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT DOO, Ustanička 234A, Beograd, telefoni: maloprodaja 011/7621-952, veleprodaja i servis 011/7621-953; email: info@ortopedija.co.rs; www.ortopedija-novizivot.co.rs

Broj rešenja o registraciji: 000003727 2024 59010 009 000 515 059 04 003 od 11.01.2024. godine

PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, u roku od 6 meseci od datuma kupovine.

Uz prigovor se **OBAVEZNO** podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda ili povraćaj plaćenog iznosa samo ukoliko proizvod nije korišćen, nije oštećen ni na koji način i u originalnom je pakovanju. Prodavac će detaljno pregledati proizvod i utvrditi ispunjenost svih uslova za prihvatanje prigovora.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom.