

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – GRUPA SPLINTOVI ZA PRSTE

ML-0607, ML-0608, ML-0609, ML-0610, ML-0611, ML-0612

Splint za prst, tip *baseball*: Od laminiranog aluminijuma, sa sunđerom na unutrašnjoj strani. Koristi se za držanje prsta u nepomičnom položaju i nakon preloma prsta.

Splint za prst, tip *cot*: Od laminiranog aluminijuma, sa sunđerom na unutrašnjoj strani. Koristi se za držanje prsta u nepomičnom položaju i nakon preloma prsta.

Splint za prst, tip *kit assortment*: Od laminiranog aluminijuma, sa sunđerom na unutrašnjoj strani. Koristi se za držanje prsta u nepomičnom položaju i nakon preloma prsta.

Splint za prst, tip *frog*: Od laminiranog aluminijuma, sa sunđerom na unutrašnjoj strani. Koristi se za držanje prsta u nepomičnom položaju i nakon preloma prsta.

Splint za prst, tip *aluminium spoon*: Od laminiranog aluminijuma, sa sunđerom na unutrašnjoj strani. Koristi se za držanje prsta u nepomičnom položaju i nakon preloma prsta.

Splint za prst, tip *stax*: Koristi se za držanje prsta u nepomičnom položaju i nakon preloma prsta.

Splint za prst, tip *extension*: Koristi se za držanje prsta u nepomičnom položaju i nakon preloma prsta.

SAVETI I UPOZORENJA

- Ovaj proizvod koristiti samo uz savet lekara.
- Ovaj proizvod se ne može koristiti u druge svrhe od onih za koje je namenjen i ne može se koristiti sa drugim proizvodima.
- Ukoliko imate alergiju na lateks ili gumu, molimo proverite komponente proizvoda i u tom slučaju nosite pamučni donji veš koji će upijati znoj i vlagu.
- Naša firma ima pravo da vrši modifikacije na proizvodu bez prethodnih obaveštenja kupaca.

INSTRUKCIJE ZA PRANJE

- Ne perite u veš mašini.
- Ne koristite deterdžent.
- Nakon pranja, dobro osušite pre upotrebe.

SAVETI ZA UPOTREBU

- Uverite se da je veličina proizvoda odgovarajuća vašoj veličini.
- Koristi se samo za one delove za koje je namenjen.



BEYAZGRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Başkent O.S.B 19.Cad. No :24 Malıköy Sincan- ANKARA - TÜRKİYE
Tel : +90 312 434 12 32 Fax : +90 312 434 12 33 e-mail : beyazgrup@beyazgrup.org

Caution	Consult instructions for use	Keep away from sunlight	Catalogue number	Do not use if package is damaged	Manufactured by	Use by date	Non Sterile	Latex Free
			REF					

Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer u RS:

ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT DOO, Ustanička 234A, Beograd, telefoni: maloprodaja 011/7621-952, veleprodaja i servis 011/7621-953; email: info@ortopedija.co.rs; www.ortopedija-novizivot.co.rs

Broj rešenja o registraciji: 000003727 2024 59010 009 000 515 059 04 003 od 11.01.2024. godine

PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, u roku od 6 meseci od datuma kupovine.

Uz prigovor se **OBAVEZNO** podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda ili povraćaj plaćenog iznosa samo ukoliko proizvod nije korišćen, nije oštećen ni na koji način i u originalnom je pakovanju. Prodavac će detaljno pregledati proizvod i utvrditi ispunjenost svih uslova za prihvatanje prigovora.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom.