

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – GRUPA STEZNICI/POJASEVI/MIDERI

**ML-0201, ML-0203, ML-0205, ML-0206, ML-0207, ML-0209, ML-0211, ML-0215,
ML-0216, ML-0230, ML-0231, ML-0232, ML-0233, ML-0235, ML-0613, ML-0621,
ML-0625, ML-0627, ML-0719, ML-0737**

Steznik za leđa, lumbosakralni: Stabilizuje sakroilijačni zglob tokom hroničnih bolova u donjem delu leđa i ublažava bol u lumbosakralnom delu nakon operacija i tretmana hernije.

Steznik za leđa, torakolumbosakralni: Pomaže u ispravljanju kičme i lečenju kifoze. Pruža stabilnost u slučaju hiperekstenzije kod preloma pršljenova lumbalnog i torakalnog dela kičme.

Ortoza za pravilno držanje ramena: Pruža stimulativni efekat kod poremećaja držanja i blagog stepena kifoze.

Steznik za grudni koš, postoperativni: Podržava grudnu kost nakon operacije grudnog koša ili srca. Omogućava stabilizaciju kod preloma grudne kosti.

Pojas, abdominalni: Pruža podršku abdomenu nakon operacije. Kao prevencija opuštanju abdominalnog dela nakon trudnoće.

Pojas za trudnice: Smanjuje bol u lumbalnom delu tokom trudnoće.

Steznik sa otvorom za kolostomu: Pruža podršku abdomenu kod pacijenta sa kolostomom.

Helanke za mršavljenje – termo: Pomaže smanjenje obima u struku, kukovima i abdomena.

Pojas, abdominalni, za umbilikalnu kilu: Posедуje jastuče koje je specijalno dizajnirano da pritiska kilu unazad. Pojas se podešava uz pomoć čičak trake. Ne ometa svakodnevne aktivnosti. Koristi se nakon operacije kako bi se sprečilo ponovno nastajanje kile i kao podrška lečenju. Može se nositi ispod odeće.

Hiperekstenzioni korset: Ortoza koja ima tri uporišne tačke. Udobna za nošenje.

Hiperekstenzioni korset Jewett: Ortoza koja ima tri uporišne tačke. Udobna za nošenje.

Aparat po Pavliku za iščašene kukove: Koristi se kod dislokacije kuka.

Abdukciona ortoza za kuk: Ortoza za abdukciju kuka. Postoperativna stabilizacija i ograničenje pokreta zgloba kuka, kod dislokacije, zamene, revizije i preloma kuka.

SAVETI I UPOZORENJA

- Ovaj proizvod koristiti samo uz savet lekara.
- Ovaj proizvod gubi svoje karakteristike na visokim temperaturama.
- Ukoliko želite da napravite modifikacije radi lakše upotrebe, posavetujte se sa lekarom ili na prodajnom mestu na kom ste kupili proizvod.
- Ovaj proizvod se ne može koristiti u druge svrhe od onih za koje je namenjen i ne može se koristiti sa drugim proizvodima.
- Savetuje se da se proizvodi od neprena koriste 3-4 sata po ciklusu. Za druge materijale savetuje se da se ne nose duže od 8 sati (osim ako lekar nije drugačije preporučio).
- Ukoliko imate alergiju na lateks ili gumu, molimo proverite komponente proizvoda i u tom slučaju nosite pamučni donji veš koji će upijati znoj i vlagu.
- Naša firma ima pravo da vrši modifikacije na proizvodu bez prethodnih obaveštenja kupaca.

INSTRUKCIJE ZA PRANJE

- Ne perite u veš mašini.
- Perite ručno na temperaturi ispod 40 stepeni.
- Ne koristite deterdžent.
- Nemojte peglati proizvod.
- Nakon pranja, dobro osušite pre upotrebe.

SAVETI ZA UPOTREBU

- Uverite se da je veličina proizvoda odgovarajuća vašoj veličini.
- Kod lumbosakralnih steznika, postavite čelične i plastične podrške u položaj kod lumbalnih i sakralnih diskova pršljenova, i spojite čičak trake sa prednje strane u predelu abdomena.
- Kod torakolumbosakralnih steznika, postavite čelične podrške u položaj koji uključuje torakalne, lumbalne i sakralne diskove pršljenova.
- Otvorite čičak trake na stezniku, ako ih ima, i spojite ih na abdomenu.
- Ako su dostupne, provucite naramenice ispod pazuha, ukrstite ih na leđima i ponovo spojite čičak trake na abdomenu.
- Otvorite čičak kopče na stezniku za grudni koš, spojite ih u predelu leđa, provucite naramenice preko ramena i spojite ih na grudima.



BEYAZGRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Başkent O.S.B 19.Cad. No :24 Maliköy Sincan- ANKARA - TÜRKİYE
Tel : +90 312 434 12 32 Fax : +90 312 434 12 33 e-mail : beyazgrup@beyazgrup.org

Caution	Consult instructions for use	Keep away from sunlight	Catalogue number	Do not use if package is damaged	Manufactured by	Use by date	Non Sterile	Latex Free
			REF					

Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer u RS:

ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT DOO, Ustanička 234A, Beograd, telefoni: maloprodaja 011/7621-952, veleprodaja i servis 011/7621-953; email: info@ortopedija.co.rs; www.ortopedija-novizivot.co.rs

Broj rešenja o registraciji: 000003727 2024 59010 009 000 515 059 04 003 od 11.01.2024. godine

PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, u roku od 6 meseci od datuma kupovine.

Uz prigovor se OBAVEZNO podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda ili povraćaj plaćenog iznosa samo ukoliko proizvod nije korišćen, nije oštećen ni na koji način i u originalnom je pakovanju. Prodavac će detaljno pregledati proizvod i utvrditi ispunjenost svih uslova za prihvatanje prigovora.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom.