

## IDENTIFIKACIONI LIST

Finalna inspekcija:

Ime:

Potpis:

Proizvod je pod garancijom u periodu od 12 meseci od dana kupovine. Garancija pokriva neispravne materijale i nedostatke u obradi.

Identifikaciona nalepnica:

### Uslovi garancije:

1. Na ovaj proizvod se primenjuje garancija od 12 meseci od datuma prodaje. Garancija se primenjuje za materijal i oštećenja u proizvodnji.
2. Garancija se mora primeniti u firmi gde je proizvod kupljen ili u ovlašćenom servisu.
3. **Ispravno ispunjena garancija i kopija dokumenta o preuzimanju moraju se priložiti prilikom reklamacije. Ne skidajte identifikacionu karticu. Mora biti čitljiva i neoštećena tokom celog garantnog perioda.**
4. Svaka oštećenja koja su nastala moraju se popraviti odmah nakon pronalaska. Korisnik je u potpunosti odgovoran za oštećenja nastala usled upotrebe proizvoda bez popravke.
5. Proizvod se mora u potpunosti koristiti u svrhu za koju je određen, korisnik mora da sledi uputstva navedena u uputstvu za upotrebu. Proizvođač / distributer nije odgovoran za oštećenja nastala usled nestručnog rukovanja i suprotno uputstvima za upotrebu.
6. Proizvod se mora pravilno upotrebljavati, tretirati, održavati i skladištiti u skladu sa uputstvima koja su navedena u uputstvu za upotrebu.
7. Postupak garancije može se pokrenuti ako je predmetni proizvod poslan kompletno u originalnom pakovanju, pažljivo upakovan i zaštićen od oštećenja. Vlasnik je dužan da pre reklamacije proizvod pravilno očisti, mora biti higijenski tretiran iz higijenskih razloga. Vlasnik ne može tražiti od prodavca da obavlja osnovno održavanje ili čišćenje proizvoda tokom postupka reklamacije.
8. Svaka greška mora se odmah prijaviti.
9. Garancija se gubi ako su oštećenja nastala zabranjenim preopterećenjem, nezgodom, grubim korišćenjem ili intervencijom neovlašćenih lica ili nekompetentnim rukovanjem.
10. Garantni rok se ne može produžiti iako se u periodu korišćenja pravilno koristio i tretirao, uključujući održavanje i pravilno korišćenje, u skladu sa njegovim karakteristikama, nameni itd opisanim u ovom uputstvu.
11. Inženjersko rešenje ne garantuje idealno kretanje.

Datum prodaje (dan, mesec, godina)

Naziv (vrsta), broj telefona, pečat, potpis prodavca:

\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_\_

Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer u RS:

Ortopedija - Novi Život doo, Ustanička 234A, Beograd  
Tel: maloprodaja 011/7621-952, veleprodaja i servis 011/7621-953  
Email: [info@ortopedija.co.rs](mailto:info@ortopedija.co.rs)  
[www.ortopedija-novizivot.co.rs](http://www.ortopedija-novizivot.co.rs)

Broj rešenja 515-02-03354-19-004 od 02.12.2019.

**patron**<sup>®</sup>

Uputstvo za upotrebu ..... (SRB)  
- mehanička invalidska kolica, dečija

## TOM 4

( ver. Classic / veličine: MINI, STD, MAXI, SM42)



Proizvodnja i distribucija:  
PATRON Bohemia a.s.  
Českolipská 3419  
27601 Mělník, Česká Republika  
tel.: +420-315 630 111  
[http:// www.patron.eu](http://www.patron.eu)

DPR171003



**Poštovani korisnici,**

Hvala vam na ukazanom poverenju u izboru našeg proizvoda za pozicioniranje TAMPA. Pedijatrijsko pozicioniranje i podešavanje sedišta za decu sa posebnim potrebama - proizvodi za pozicioniranje Tampa Std / Maki / SM42 dizajnirani su samo za unutrašnju upotrebu i za upotrebu na glatkim površinama. Pre prve upotrebe, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu. U slučaju da niste potpuno sigurni kako upotrebiti proizvod, čak i nakon čitanja uputstva, obratite se lokalnom zvaničnom prodavcu ili ovlašćenom servisu. Sačuvajte uputstvo za upotrebu za buduću upotrebu.

**SIGURNOSNE NAPOMENE**

- Molimo pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.
- Pre svake upotrebe potrebno je proveriti sve uređaje za zaključavanje (pričvršćivanje sedišta na postolje, zategnutost ručice naslona i teleskopa sedišta).
- Pre upotrebe potrebno je potražiti stručni medicinski savet u pogledu pogodnosti ovog proizvoda.
- Morate biti upoznati sa uputstvima koja su navedena.
- Proverite da li dete udobno sedi pre početka vožnje i da li su odeva, prekrivač itd dobro ušuškan oko deteta da se ne bi upleli u točkove.
- Uvek aktivirajte ručne kočnice kada se kolica ne pomeraju.
- Nikada ne ostavljajte kolica okrenuta ka ivici.
- Sedište se NE SME koristiti kao auto sedišta za dete tokom putovanja u motornom vozilu ili autobusu.
- Morate da preduzmete mere zaštite od požara. U zgradama proverite lokaciju izlaza za požar i šemu evakuacije.
- Ne dozvolite detetu da se igra sa kolicima ili visi sa kolica.
- Ne koristite kolica u druge svrhe osim za koje je predviđeno.
- Osigurajte da dete ne dira pokretne delove tokom podešavanja sedišta da ne bi došlo do povreda.
- Kompanija PATRON Bohemia a.s. ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu upotrebom drugog pribora osim originalnog koji isporučuje ova kompanija. Kompanija PATRON Bohemia a.s. ne snosi nikakvu odgovornost za štetu i nezgode uzrokovane neadekvatnom upotrebom ovog proizvoda.
- Kolica nisu dizajnirana za vožnju po stepenicama.
- Okretanje smeru sedišta mora da se uradi dok dete nije u kolicima i sa potpuno praznim sedištem.
- Ne dozvolite detetu da se nesmetano penje i izlazi iz sedišta. Ne opterećujte sedišta drugim detetom ili priborom koji ne proizvodi i isporučuje kompanija PATRON Bohemia a.s.
- Uvek aktivirajte kočnice pri ulasku i izlasku iz kolica.
- Uvek proverite da li su svi pribori za pričvršćivanje, sigurnosni kajš i druga oprema pravilno postavljeni i podešeni.
- Nikada nemojte stajati na papučice za noge.


**UPOZORAVALJUĆE NAPOMENE**

- 1) TORBICE ZAKAČENE NA RUKOHVAT UTIČU NA STABILNOST KOLICA!
- 2) NIKADA NE OSTAVLJAJTE DETE BEZ NADZORA!
- 3) PAZITE NA PRSTE DOK PODEŠAVATE TELESKOPSKI MEHANIZAM!

**OSNOVNI TEHNIČKI PODACI**


	<b>T4C MINI</b>	<b>T4C STD</b>	<b>T4C MAXI</b>	<b>T4C SM42</b>
Visina naslona (mm)	450-600	520-680	570-680	570-680
Sedište dubina (mm)	270-310	270-310	320-430	320-430
Sedište širina (mm)	260/300	240/280/340	280/320/380	425
Sedište do papučica (mm)	140-280	200-350	240-400	240-400
Ugao naslona	0°-175°	0°-175°	0°-165°	0°-160°
Ugao sedišta	+/- 27°	+/- 27°	+/-25°	+/-25°
Ukupna dužina (mm)	990	990	1070	1100
Ukupna širina (mm)	580	580	630	680
Ukupna visina / sa ručkama (mm)	1010	1010	1060	1030
Težina (kg)	17,0	18,0	20,5	24,0
Nosivost (kg)	35,0	35,0	50,0	75,0
Sklopljena kolica dužina (mm)	930	930	960	960
Sklopljena kolica širina (mm)	580	580	630	680
Sklopljena kolica visina (mm)	550	550	630	680

PATRON Bohemia a.s. zadržava pravo promene dizajna na svim proizvodima.

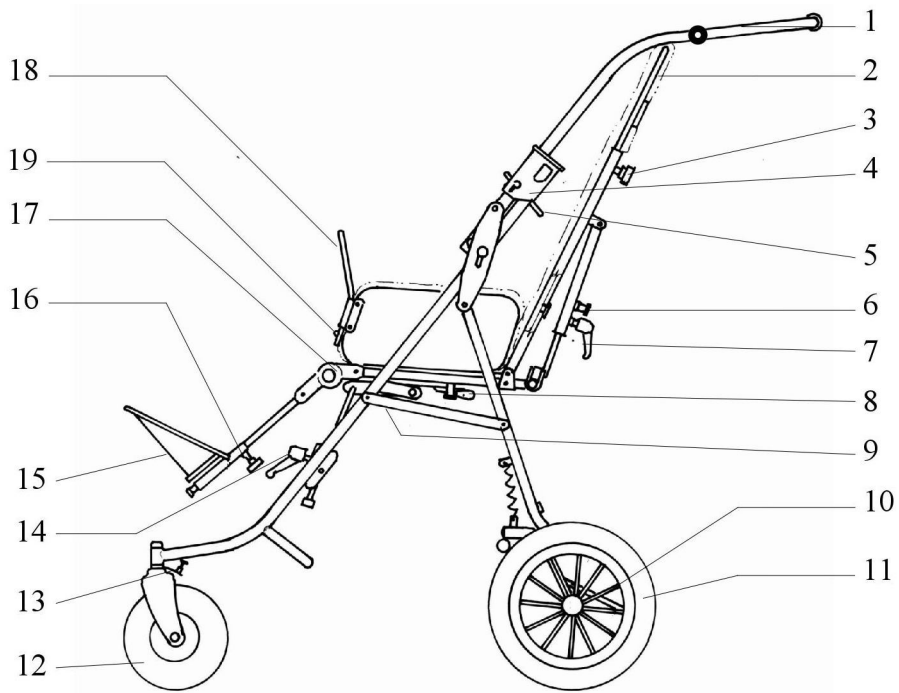

**OPIS**

1. Spoj ručke i kajša
2. Naslon za leđa
3. Šraf za podešavanje visine naslona naslona
4. Ručka za nagib
5. Sigurnosna kopča za ručku za nagib
6. Sigurnosni osigurač podešavanja nagiba naslona
7. Podešavanje nagiba naslona
8. Ručica za zaključavanje sedišta
9. Matica za podešavanje dubine sedišta
10. Parking kočnica
11. Zadnji točak
12. Prednji točak
13. Blokada pravca kretanja prednjeg točka
14. Podešavanje ugla naslona leđa
15. Papučica za noge
16. Dugme za podešavanje položaja papučice za noge
17. Podešavanje visine papučice za noge
18. Sigurnosna šipka za otpuštanje sigurnosne kopče
19. Sigurnosna kopča
20. Sigurnosna kopča za zaključavanje sedišta
21. Bočni držač unutrašnjosti sedišta
22. Prednji držač unutrašnjosti sedišta

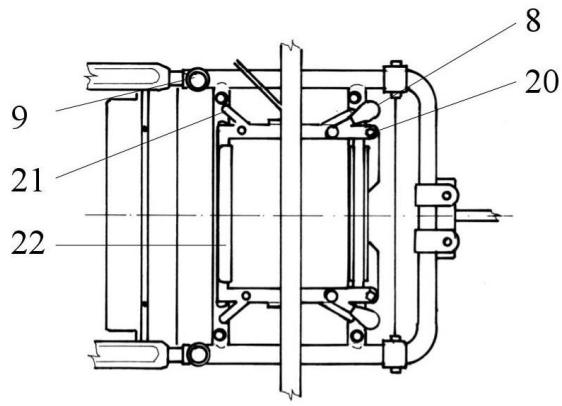

**Otvaranje rama:**

Postavite sklopjeni ram na točkove. Da biste otvorili ram između zadnjih točkova i čvrsto držite rukohvat. Pomerite rukohvat prema gore i nazad sve dok se rukohvat ne oslobodi u potpunosti i ne zaključa u krajnjem položaju. Da biste proverili položaj zaključavanja, pomaknite ručicu prema gore. Ram se ne sme savijati. Pazite da ne priključite prste prilikom otvaranja rama!

**Postavljanje sedišta u smeru vožnje:**

Postavite sedišta tačno u osigurače sedišta na ramu. Guranjem sedišta prema dole, zakrenite ručice desne brave dok se ne zaključa u položaju, ponovite radnju sa levom ručicom za zaključavanje sedišta. Konačno proverite zaključavanje sedišta laganim podizanjem sedišta. Sedište se ne sme odvajati od okvira rama (vidi sliku 1).

**Postavljanje sedišta u smeru vožnje:**

Postavite sedišta nasuprot smeru vožnje prema istom postupku kao u prethodnom poglavlju, osim okretanja sedišta za 180°, da bude okrenuto prema napred.

**Podešavanje naslona sedišta:**

Čvrsto držite sedišta. Olabavite podešavanje naslona sedišta i podesite položaj sedišta. Zategnite podešavanje da biste fiksirali položaj. Ručicu za podešavanje naslona okrenite vertikalno u najsigurniji položaj povlačenjem i rotiranjem.

**Podešavanje dubine sedišta i nogu:**

Da biste podesili dimenzije sedišta i postavljenog naslona za noge, sedišta mora biti bez putnika i prazno. Otpustite oba šrafova za podešavanje dubine sedišta kao i šrafove za podešavanje dubine papučica za noge i šraf za podešavanje dubine sedišta. Podesite dubinu sedišta povlačenjem ili guranjem. Pravilno zategnite sve podesive šrafove i matice.

**Podešavanje visine naslona:**

Otpustite i skinite sve šrafove za podešavanje visine naslona. Podesite visinu naslona leđa podizanjem ili pritiskom prema dole. Montirajte i pravilno zategnite sve šrafove za podešavanje.

**Ugao naslona:**

Čvrsto držite naslon. Olabavite podešavanje naslona i podesite položaj. Zategnite podešavanje.

**Pozicioniranje ugla rukohvata:**

Pritisnite spojnicu upravljača na obe strane, podesite upravljač u željeni položaj i otpustite.

**Podešavanje visine stopala:**

Držite oslonac za noge. Otpustite šrafove za podešavanje visine stopala. Podesite položaj stopala za noge i pravilno zategnite oba šrafova za podešavanje. Malim ručicama za podešavanje zavrtite u najsigurniji položaj povlačenjem i okretanjem.

**Nagib papučica za noge:**

Pritisnite oba tastera istovremeno na šarkama na papučicama za noge i podesite ugao položaja stopala. Oslobodite oba dugmeta i podesite položaj stopala za noge kako biste omogućili zaključavanje šarki.

**Rukovanje kočnicom:**

Za kočenje točkova u potpunosti pritisnite kočnicu za kočenje. Da biste potpuno otkočili ručnu kočnicu, potpuno povucite polugu kočnice. (vidi prilogu 2).

**Sigurnosni kajš:**

Da biste postavili sigurnosni kajš, stavite oba kraja sigurnosne šipke u cevi sa sedištem odjednom. Da biste izvadili sigurnosni kajš, pritisnite otpusno dugme i podignite sigurnosni kajš prema gore.

**Ulazak u kolica:**

Osigurajte da je ručna kočnica zakočena, za lak ulazak u kolica podesite položaj papučice za noge što je dalje moguće ispod sedišta i preklopite papučicu (vidi priloženu sliku 2); ako je moguće, kolica stavite uza zid ili nepokretni predmet (alternativno, drugi pomagač može čvrsto držati kolica); dete oprezno smestite u kolica, pričvrstite sav pribor za imobilizaciju i sigurnosni kajš, podesite papučicu za noge u udoban položaj. Dete se uvek mora osećati udobno u kolicima.

**Izlazak iz kolica:**

Proverite da li je ručna kočnica zakočena; za lak izlazak iz kolica podesite položaj papučice za noge što je dalje moguće ispod sedišta i preklopite papučicu (vidi priloženu sliku 2.); ako je moguće, kolica stavite uza zid ili nepokretni predmet (alternativno, drugi pomagač može čvrsto držati kolica); dete oprezno izvadite iz kolica, otkočite sav pribor za imobilizaciju i sigurnosni kajš i pažljivo podignite dete.

**Prelazak ivičnjaka ili jednog stepenika:**

**Silazak na dole** - stavite prednje točkove do ivice pločnika, čvrsto držite ručke i kolica nagnite unazad da težiste bude na zadnjim točkovima, dodajte zadnjim točkovima do ivice pločnika i lagano spustite kolica preko ivice zadnjim točkovima. Nikada ne podižite zadnji deo kolica prema ivici. Nikada ne okrećite kolica prema stepenicama.

**Penjanje na gore** - stavite prednje točkove do ivice pločnika. Čvrsto držite ručke, nagnite kolica unazad i prednje točkove postavite na ivičnjak. Malo gurnuti kolica tako da zadnji točkovi dodju do ivice i podignite kolica na nivo pločnika.

- koristiti rampe, platforme ili liftove, kada su dostupni
- gde je moguće izbegavati stepenike, ako ne postoje druge mogućnosti, neka vam bar jedna osoba pomogne
- ne pokušavajte da dižete kolica ili spuštate uz / niz stepenište, osim ako vi i vaš pomoćnik niste sigurni da imate kontrolu nad kolicima i možete da podignete težinu deteta i kolica.
- tokom ove operacije, pratioci i pomagači moraju biti dobro uskladjeni i čvrsto držati kolica
- kolica morate držati svo vreme
- odmarajte se u redovnim intervalima
- ne podižite kolica držeći papučiće za noge

**Spuštanje niz stepence** - kolica uspravno postavite s prednjim točkovima na prvi stepenik (ili podest), nagnite ih prema nazad i gurajte kolica prema napred dok zadnji točkovi ne budu na vrhu stepeništa; pomagač stoji ispred, drži čvrsto kolica za prednji okvir (ram); spustite zadnje točkove niz prvi stepenik i korak po korak nastavljajte prema dnu (slika br. 3).

**Penjanje uz stepenice** - kolica postavite prednjim točkovima uz prvi stepenik, nagnite ih i postavite ih na prvi stepenik; pomagač stoji iznad kolica, drži ih čvrsto i podiže ih hvatajući prednji okvir (ram); nastavite korak po korak do vrha (slika br. 4).

#### **Sklopavanje kolica:**

Podesite položaj nogu za noge vodoravno, preklopite ploču za noge i skinite sigurnosnu traku. Povucite naslon koliko je to moguće napred prema bazi sedišta. (Preporučujemo da izvadite dodatni pribor za pričvršćivanje, da smanjite veličinu presavijenih kolica) Podignite pokretni deo sklopivog otvarača rukohvata, podignite sigurnosni kopču za otpuštanje rukohvata i gurnite rukohvat prema prednjim točkovima. (vidi sliku 5, 6). Tokom sklopavanja parking kočnica se mora otpustiti!

#### **Skidanje sedišta:**

Da biste rastavili sedište, otpustite obe brave i podignite sedište. Sedište mora biti bez korisnika i prazno.

#### **Sklopavanje rama:**


Pre sklopavanja rama skinite sedište. Podignite pokretni deo za otpuštanje ručke, podignite sigurnosni kopču za otpuštanje ručke i preklopite ručicu prema prednjim točkovima. (vidi sliku 5, 6). Tokom sklopavanja parking kočnica se mora otpustiti!

#### **Tapacirung sedišta:**

Tapacirung sedišta je potpuno odvojiv i može se prati na nižim temperaturama (mak. 40 ° C).

**Navlaka naslona za leđa** - stavite gornji deo navlake preko gornje ivice naslona, pri čemu se donji kraj uvuče u razmak između naslona i osnove sedišta. Učvrstite donji kraj tkanine čičak trakom (suvi patent zatvarač na zadnjoj strani naslona).


**Navlaka sedišta** - postavite sa strane jednu po jednu, precizno postavite poklopac i fiksirajte čičak tgrakom guranjem u sredinu sedišta.

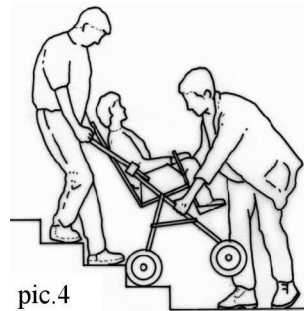

pic.4




pic.5

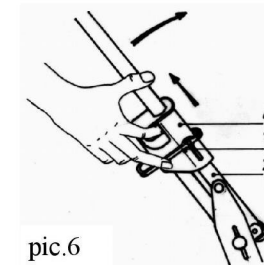


pic.6




pic.7

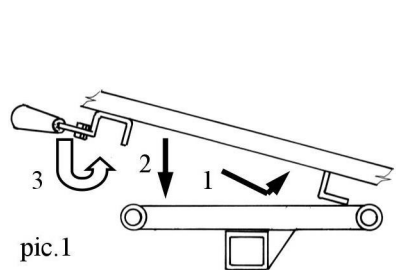

pic.1

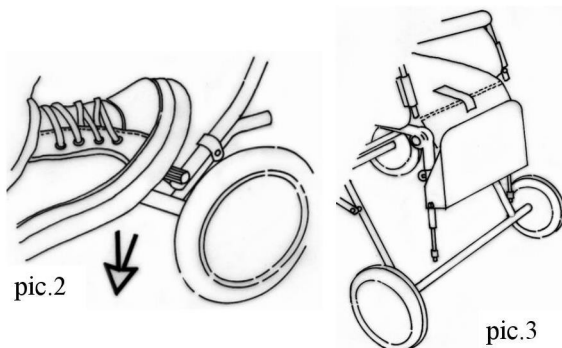

pic.2

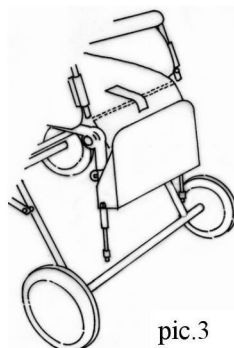

pic.3

## **ODRŽAVANJE**

Kolica su dizajnirana po visokim standardima i uz pravilnu upotrebu i održavanje pružice vam dugogodišnju upotrebu, bez korišćenja pomoći ovlašćenog servisa.

- Redovno pregledajte zaštitne trake, uređaje za zaključavanje, hvataljke, zglobove i papučiće kako biste bili sigurni da su i dalje sigurni i funkcionalni. Kočnice, točkovi i presvlake su delovi koji se lako troše i zato ih je potrebno menjati uvek kada je to neophodno.
- Preporučuje se da ovaj uređaj pregledava ovlašćeni servis na svakih 12 meseci.
- U slučaju oštećenja ili potrebe popravke, za ove usluge su dozvoljeni samo odobreni ovlašćeni servis.
- Samo rezervni delovi koje isporučuje kompanija PATRON Bohemia a.s. mogu se koristiti za popravke.
- Na pokretne delove redovno nanosite maziva za prskanje (npr. VD40), minimalno svakih šest meseci, nikada ne koristite ulje ili vazelin.
- Pazite da ne koristite preveliku količinu maziva (može prouzrokovati nanošenje nečistoće na pokretne delove). Obrišite višak maziva.
- Uverite se da ste pravilno upoznati sa uputstvima koja su navedena u ovom uputstvu za upotrebu.
- Manipulacija sedištem kada ga podešavate mora biti uvek jednostavna i lagana. Ako nije tako, pročitajte ponovo odgovarajući deo uputstva za korisnike.
- Ram, plastika i točkovi mogu se oprati toplom vodom uz dodatak uobičajenog deterdženta.
- Tapacitug je moguće očistiti krpom namočenom u toploj vodi, eventualno oprati u veš mašini na maksimalnoj temperaturi od 40 ° C na programu za osetljiv veš.
- Nikada ne čistite abrazivom, amonijakom, izbeljivačem ili sredstvima na bazi alkohola.
- Nakon izlaganja vlažnim uslovima, osušite kolica mekom krpom i ostavite ih rasklopljena u u toploj prostoriji.
- Čuvajte kolica na suvom i sigurnom mestu sa preporučenom temperaturom 5-20 ° C.
- Redovno proveravajte i zategnite šrafove.
- Preporučujemo da posle 24 meseca posetite servis.
- Ako se koriste kontrolni kablovi (kočnice, teleskopi, nagib), redovno ih proverite i po potrebi podesite i podmažite.

## GARANCIJA

POŠTOVANI POTROŠAČI!  
Ovaj proizvod servisira ORTOPEDIJA NOVI – ŽIVOT, Ustanička 234A, Beograd, tel/fax: 011/7621-952,  
(953,954,956)

Zahvaljujemo Vam na kupovini naših proizvoda.

### Garancijska izjava

**Garantne obaveze** privrednog društva ORTOPEDIJE – NOVI ŽIVOT d.o.o. iz Beograda (u daljem tekstu ONŽ) ograničene su samo na obaveze navedene u ovom dokumentu. Ne prihvataju se nikakve dodatne obaveze koje nisu pomenute u garantnom listu.

ONŽ garantuje da će proizvod u garantnom roku pravilno funkcionisati ako njime budete rukovali prema priloženom uputstvu i u granicama izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Garancija i garantni rok počinje datumom preuzimanja proizvoda, što ćete dokazati overenim garantnim listom.

**Garantovana prava potrošača:** ONŽ garantuje kvalitet proizvoda u garantnom periodu i pod uslovima u ovom garantnom listu. Ukoliko se u garantnom roku pokaže oštećenje proizvoda zbog nekvalitetnih materijala ili izrade, ONŽ će:

obezbediti popravku proizvoda bez nadoknade za rad i delove, korišćenjem novih delova, i u predviđenom roku (1),

zameniti proizvod novim i/ili funkcionalno ekvivalentnim (2).

ONŽ zadržava isključivo pravo da odabere način ispunjenja svojih garantnih obaveza iz ovog garantnog lista.

Ukoliko nedostaci na proizvodima, u skladu sa garantnim uslovima, nisu otklonjeni u roku od 45 dana od dana prijema uređaja na servis, ONŽ se obavezuje da u interesu kupca razreši reklamaciju na način pod brojem (2).

#### Rezervni delovi:

ONŽ se obavezuje da će obezbediti rezervne delove ili funkcionalne ekvivalente proizvoda u periodu od 12 meseci od datuma isporuke/preuzimanja proizvoda.

ONŽ nije u obavezi da obezbedi rezervne delove u slučaju da:

- ❖ proizvođač nije predvideo popravku proizvoda pa stoga ne nudi rezervne delove ili je cena novog proizvoda niža od troška popravke,
- ❖ se usled primene novih tehnologija ili iz bilo kojeg drugog razloga pojedini elementi prestanu proizvoditi,
- ❖ je proizvođač bankrotirao ili iz bilo kojeg drugog razloga nije više prisutan u ponudi na našem ili svetskom tržištu.

#### Garantni rok:

Garantni rok za proizvod je 12 meseci uz poštovanje uputstva za upotrebu i drugih garancijskih uslova.

### OSTVARENJE GARANCIJE

**Uputstva i uslovi garancije:** Da bi se izbegle neprijatnosti i dodatni troškovi, predlažemo Vam da pažljivo pročitate garantni list i uputstvo za upotrebu proizvoda. Trenutkom kupovine proizvoda u potpunosti prihvatate garantne uslove navedene u ovom garantnom listu.

**Pregled/inspekcija proizvoda i pratećih elemenata:** Potrošač je dužan da pregleda kupljene proizvode u trenutku preuzimanja. Ukoliko neki deo proizvoda nedostaje, nije kompletan ili je fizički

oštećen, potrošač mora o tome trenutno obavestiti ONŽ. Naknadni zahtevi po ovom osnovu se neće razmatrati.

**Overen garantni list:** Potrošač je dužan da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi garantnog lista, bez kojeg garancija ne važi. Garancija se ostvaruje samo na osnovu priloženog fiskalnog računa i originalnog garantnog lista, čitko i pravilno popunjenog i overenog od strane ovlašćenog prodavca. Prepravke na garantnom listu su dozvoljene samo uz overu pečatom i uz potpis ovlašćenog prodavca.

**Ovlašćeni servis:** Garancija se može ostvariti samo u servisu ONŽ.

**Transport proizvoda u servis:** Da bi ostvario svoja navedena prava potrošač tj. kupac proizvoda koji reklamira, treba da donese isti u prodavnicu gde je proizvod kupio i da pokaže fiskalni račun i garantni list.

**Troškovi transporta:** Troškove transporta neispravnog proizvoda do ovlašćenog servisa snosi potrošač. Plaćanje osiguranja odnosno rizik oštećenja ili nestanka proizvoda tokom transporta kao i od servisa su takođe na teret potrošača. Potrošač je u obavezi da pokrije troškove transporta i osiguranja proizašle iz povraćaja ispravnog proizvoda kupcu. Ovi troškovi se kupcu dokazuju računima.

**Transportna ambalaža:** Kupac je dužan da proizvod, prilikom reklamiranja, zajedno sa pratećom dokumentacijom, dopremi u ovlašćeni servis adekvatno upakovan, kako bi se maksimalno zaštitio od oštećenja prilikom transporta. ONŽ ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja koja su nastala prilikom transporta, a posledica su neadekvatnog pakovanja od strane kupca koji proizvod reklamira.

### GARANTNI USLOVI

**Neprenosivost bez saglasnosti:** Garancija predstavlja sastavni deo kupoprodajnog ugovora i kao takva se ne može prenostiti na drugo lice bez pravilno overene i potpisane saglasnosti oba ugovarača.

**Ispravnost uređaja:** Garancija se odnosi isključivo na proizvođačku ispravnost uređaja, a ne na očekivane performanse i funkcionalnost od strane korisnika. ONŽ ne snosi nikakvu odgovornost za uticaj medija na kupca u vezi sa očekivanim funkcionalnim osobinama elemenata, koje nemaju realne veze sa proizvođački predviđenim performansama.

Terenske usluge i održavanje: Servisne usluge na terenu i/ili preventivno održavanje proizvoda nisu uračunati u cenu proizvoda pa se naplaćuju prema cenovniku servisnih usluga ili prema ugovorima o servisiranju koje kupac može posebno zaključiti.

Preuzimanje proizvoda iz servisa: Kupac je u obavezi da sam obezbedi preuzimanje popravljenog proizvoda. Ukoliko ovlašćeni servis iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da o obavljenoj popravci obavesti kupca, ili kupac iz bilo kog razloga izbegava preuzimanje uređaja, ovlašćeni servis je u obavezi da proizvod čuva maksimalno 60 dana od dana prijema na servis. Ovlašćeni servis će u pismenom obliku obavestiti kupca o isteku roka, a nakon tog perioda ONŽ ne snosi nikakvu odgovornost za robu u vlasništvu kupca.

**Predmet garancije:** Garantni uslovi važe za sve proizvode, osim za sledeće: proizvodi ili delovi proizvoda koji se troše i time se smatraju potrošnim materijalom.

Garantni uslovi važe za usluge servisnih intervencija na proizvodu predviđene ovim garantnim listom, osim u sledećim slučajevima kada se naplaćuju po važećem servisnom cenovniku: preventivno tekuće održavanje opreme, na primer čišćenje ili podmazivanje uređaja, utrošeno servisno vreme na pregled, dijagnozu ili rešenje neispravnosti čiji uzrok nije predviđen ovim garantnim listom. U ovakve intervencije spadaju i bilo koji drugi razlozi

koji ne potpadaju pod garantne uslove. Ovakve usluge se obavezno naplaćuju.

### ISKLUČENJE IZ GARANCIJE

Prava kupca koja proizilaze iz ove garancije su nevažeća i ne mogu se ostvariti u sledećim slučajevima tj. garancija se ne priznaje:

- ❖ posle isteka garantnog roka bez obzira kada je proizvod počeo da se koristi,
- ❖ ako je proizvod kupljen u drugoj firmi – garanciju priznaje firma u kojoj je proizvod kupljen,
- ❖ ukoliko je uklonjen ili oštećen zaštitni pečat ili zaštitna nalepnica na proizvodu ili bilo kom njegovom delu,
- ❖ ukoliko postoji neslaganje podataka na garantnom listu i reklamiranom proizvodu, ili ukoliko je ustanovljen pokušaj falsifikovanja garantnog lista ili podataka u njemu,

- ❖ ako je serijski broj i oznaka modela, proizvoda ili nekog njegovog dela, zamenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak,
- ❖ ukoliko se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i preporuka o montaži, upotrebi i održavanju proizvoda ili ukoliko je nestručno i nebrižljivo postupao sa reklamiranim proizvodom,
- ❖ ukoliko su na proizvodu vršene intervencije, dogradnje ili održavanje od strane neovlašćenog lica ili servisa, bez obzira na njegovu stručnost i bez obzira da li su ovakve intervencije po mišljenju korisnika uticale na neispravnost proizvoda,
- ❖ ako su oštećenja nastala usled ugradnje neodgovarajućih delova ili upotrebe neodgovarajućeg potrošnog materijala,
- ❖ ukoliko je proizvod korišćen mimo fabrički predviđenog režima eksploatacije ili za bilo koje druge namene van standardno očekivanih i prihvatljivih. U ovaj izuzetak spada i nepredviđeno korišćenje proizvoda u zahtevne profesionalne ili poluprofesionalne svrhe, a da te svrhe nisu proizvođački eksplicitno navedene kao dozvoljene,
- ❖ ukoliko su nepravilnosti u radu reklamiranog proizvoda prouzrokovane neadekvatno niskom ili visokom temperaturom, prekomernim izlaganjem suncu, uticajem vatre, povišenom vlagom, uticajem vode ili bilo koje druge tečnosti, prekomernim taloženjem prašine ili druge nečistoće, usled udara vetra ili nekom višom silom kao što su udar groma sa pratećim pojavama, poplave, požari, zemljotres ili nekim uzrokom izvan kontrole ONŽ-a.

## GARANTNI LIST I SERVISNI LIST ZA KRAJNJEG KORISNIKA

**POŠTOVANI POTROŠAČI!**  
 Ovaj proizvod servisira ORTOPEDIJA NOVI – ŽIVOT, Ustanička 234A, Beograd, tel/fax: 011/7621-952, (953,954,956)

<i>Kupac</i>	
<i>Adresa</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>Proizvod, model</i>	
<i>Serijski broj</i>	
<i>Datum kupovine/iskoruke</i>	
<i>Napomena</i>	
<i>Potpis i pečat</i>	

servisni kupon 1	
Datum	
Opis posla	
Napomena	
Potpis i pečat	
servisni kupon 2	
Datum	
Opis posla	
Napomena	
Potpis i pečat	