

UPUTSTVO ZA DODATKE/NASTAVKE ZA WC ŠOLJU

CLIPPER I - VII tvrdi / CONTACT PLUS meki Visina: 10 CM

CLIPPER I DODATAK ZA WC - TVRDI

- Nosivost 185 kg max
- Uputstvo Podići dasku sa WC šolje, staviti dodatak, lagano pritisnuti; proveriti da li je dobro nalegao na šolju; gume na donjoj strani će sprečiti klizanje.
- Održavanje Prati ručno svakog dana blagim dezinfekcionim rastvorom ili blagim tečnim sapunom (bez hlora) i isprati čistom vodom. Ne koristiti abrazivna sredstva.

CLIPPER II i III DODATAK ZA WC - TVRDI

- Nosivost 185 kg max
- Uputstvo Staviti 4 plastične ručice u nosače (na donjoj strani dodatka), podići dasku sa WC šolje, staviti dodatak, lagano pritisnuti, proveriti da li je dobro nalegao na šolju, jednu po jednu ručicu podesiti da fiksiraju dodatak uz WC šolju (clipper II i III).
- Održavanje Prati ručno svakog dana blagim dezinfekcionim rastvorom ili blagim tečnim sapunom (bez hlora) i isprati čistom vodom. Ne koristiti abrazivna sredstva.

CLIPPER IV i V DODATAK ZA WC sa ručkama - TVRDI

- Nosivost 110 kg max
- Uputstvo Učvrstiti ručke za naslanjanje u dodatak.
Staviti 4 plastične ručice u nosače (na donjoj strani dodatka), podići dasku sa WC šolje, staviti dodatak, lagano pritisnuti, proveriti da li je dobro nalegao na šolju, jednu po jednu ručicu podesiti da fiksiraju dodatak uz WC šolju. Ako dodatak ima naslon, ne naslanjati se celom težinom na naslon.
- VAŽNO Obe ručke za naslanjanje se moraju istovremeno koristiti da ne bi došlo do prevrtanja.
- Održavanje Prati ručno svakog dana blagim dezinfekcionim rastvorom ili blagim tečnim sapunom (bez hlora) i isprati čistom vodom. Ne koristiti abrazivna sredstva.

CLIPPER VI I VII DODATAK ZA WC sa ručkama i nogarama - TVRDI

- Nosivost 150 kg max
- Uputstvo Učvrstiti ručke za naslanjanje u dodatak. Učvrstiti nogare i podesiti ih tako da se oslanjaju na pod. Staviti 4 plastične ručice u nosače (na donjoj strani dodatka), podići dasku sa WC šolje, staviti dodatak, lagano pritisnuti, proveriti da li je dobro nalegao na šolju, jednu po jednu ručicu podesiti da fiksiraju dodatak uz WC šolju. Ako dodatak ima naslon, ne naslanjati se celom težinom na naslon.
- VAŽNO Obe ručke za naslanjanje se moraju istovremeno koristiti da ne bi došlo do prevrtanja.
- Održavanje Prati ručno svakog dana blagim dezinfekcionim rastvorom ili blagim tečnim sapunom (bez hlora) i isprati čistom vodom. Ne koristiti abrazivna sredstva.

DODATAK ZA WC CONTACT PLUS - MEKI

- Nosivost 185 kg max
- Uputstvo Podići dasku sa WC šolje, staviti dodatak, lagano pritisnuti, proveriti da li je dobro nalegao na šolju. Ako dodatak ima naslon, ne naslanjati se celom težinom na naslon.
- Održavanje Prati ručno svakog dana blagim dezinfekcionim rastvorom (bez hlora) ili blagim tečnim sapunom i isprati čistom vodom. Ne koristiti abrazivna sredstva.

VAŽNO: Dodatak iz higijenskih razloga treba da koristi samo jedna osoba. Ukoliko više osoba koristi jedan dodatak, posle svake upotrebe dezinfikovati.

PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list.

Uz prigovor se OBAVEZNO podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom

Proizvođač: Herdegen, Francuska

Glavni i ekskluzivni distributer:

ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT, Beograd, Milovana Milovanovića 2

Tel: 011/7621-952

e-mail: info@ortopedija.co.rs

<http://www.ortopedija-novizivot.co.rs>

<http://www.ortopedija.co.rs>

NAPOMENA!

OVO JE PROIZVOD KOJI PRIPADA GRUPI
MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA DOLAZE U
DIREKTAN DODIR SA KOŽOM I INTIMNIM DELOVIMA
TELA.

IZ HIGIJENSKIH RAZLOGA I RADI ZAŠTITE NAŠIH
KUPACA, **OVO POMAGALO SE NAKON KUPOVINE
NE MOŽE VRATITI NITI MENJATI.**

REKLAMACIJE NA OVO POMAGALO SE PRIHVATAJU
ISKLUČIVO U SLUČAJU FABRIČKOG OŠTEĆENJA.

ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT