
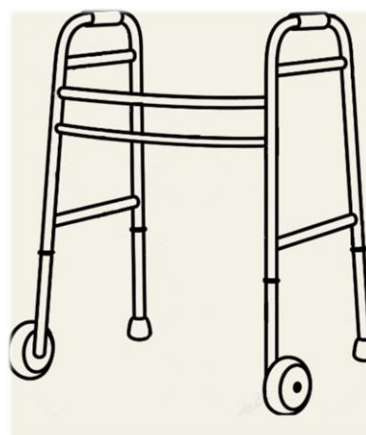


## UPUTSTVO ZA UPOTREBU HODALICE

Dragi korisniče,

Hvala vam što koristite naše proizvode. Molimo pročitajte ovo uputstvo da biste dobro upoznali naše proizvode pre upotrebe.

1. Podesite hodalicu na odgovarajuću visinu. Način podešavanja: prstom pritisnite dugme za podešavanje da biste je podesili po visini, čvrsto pričvrstite osigurač, onda se može koristiti.
2. Proverite da li je drška labava. Sprečite da vas olabavljena ručka povredi.
3. Maksimalna nosivost je do 120 kg.
4. Proverite da li su gume protiv klizanja na štakama čvrste i stabilne. Ako su izlizane, odmah ih promenite. Obratite više pažnje kada koristite štake na kosini.
5. Hodalice su pomoć pri hodaњу, nemojte ih koristiti u druge svrhe.
6. Hodalice nisu pogodne za penjanje na planine i podupiranje tela duže vreme.
7. Hodalice su izrađene od aluminijuma sa gumenim nastavcima i ručkama i PVC dodacima.
8. Rok trajanja nije primenljiv za ova medicinska pomagala.
9. Čuvanje na suvom mestu.

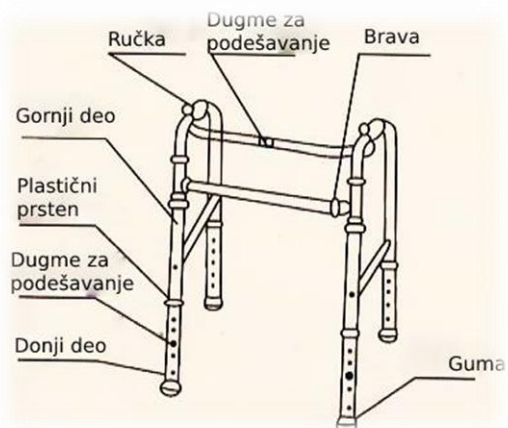


Informacije o proizvođaču i evropskom predstavniku:



**FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD**

Pingnan industrial Zone, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

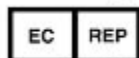

**SUNGO Europe B.V.**

Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands

## PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, u roku od 6 meseci od datuma kupovine.

Uz prigovor se OBAVEZNO podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda ili povraćaj plaćenog iznosa samo ukoliko proizvod nije korišćen, nije oštećen ni na koji način i u originalnom je pakovanju. Prodavac će detaljno pregledati proizvod i utvrditi ispunjenost svih uslova za prihvatanje prigovora.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom

Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer:

Ortopedija – Novi život doo, Ustanička 234A, Beograd

Tel. Maloprodaja: 011/7621-952

Veleprodaja i servis: 011/7621-953

Email: [info@ortopedija.co.rs](mailto:info@ortopedija.co.rs)

[www.ortopedija-novizivot.co.rs](http://www.ortopedija-novizivot.co.rs)

Broj rešenja 515-02-01373-23-003 od 29.05.2023.