

Medicinska sredstva klase 1 u skladu sa Uredbom Evropske unije o medicinskim sredstvima (MDR) 2017/745.

Ovi proizvodi su namenjeni za rukovanje od strane bilo koje osobe koja može da pročita i razume uputstvo za upotrebu. Profil pacijenta: Bilo koji pacijent čija patologija zahteva upotrebu uređaja za prevenciju i/ili lečenje dekubitusa. Profil operatera za instalaciju, implementaciju, prilagođavanje i održavanje: pacijent, zdravstveni radnici, tehničari za održavanje, treća strana.

Nema posebnih ograničenja za rukovanje i upotrebu uređaja.

NAMENA PROIZVODA

Asortiman višenamenskih aparata koji mogu da se koriste za podešavanje položaja i za prevenciju i pomoć u lečenju dekubitusa.

INDIKACIJE

Njihove univerzalne karakteristike omogućavaju da se koriste u različitim položajima: podupiranje pacijenta, ublažavanje pritiska na petama, postavljanje donjih udova u polunagnuti položaj ili pacijenta na bok, ili zaštita mesta kontakta (laktovi, kolena, danci itd).

Izbor proizvoda mora da odobri zdravstveni radnik.

USLOVI KORISĆENJA

Proizvodi sa integrisanom POLYMAILLE® / POLYMAILLE®HD navlakom mogu da se koriste za jednog ili više pacijenata. Mogu se obnoviti u skladu sa uputstvom za upotrebu proizvoda i uputstvima za čišćenje i dezinfekciju.

Prva preventivna mera protiv rana od ležanja: telo treba podizati što je češće moguće kako bi se ograničio pritisak na krvne sudove, čime se omogućava pravilna cirkulacija krvi.

KONTRAINDIKACIJE

Nemojte koristiti ovaj proizvod izvan predviđene upotrebe i indikacija. Nemojte ga koristiti ako ste alergični na poliuretane. Ako imate bilo kakvih problema, obratite se svom pružaocu zdravstvene zaštite.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nema neželjenih dejstava. Međutim, pacijent može osetiti dejstva svojstvena za uranjanje: moguće (ograničeno) smanjenje osećaja i pokretljivosti. Povećana osetljivost na toplotu.

PERFORMANSE PROIZVODA

Omožavaju rasterećenje nosećih oblasti pomoću uranjanja ili oslobađanja opterećenja. Pomaže u održavanju položaja u krevetu.

KLINIČKA KORIST

Poboljšava protok kiseonika do tkiva u zoni kontakta.

INFORMACIJE NAMENJENE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Koristite pomoćna sredstva za podešavanje položaja ili proizvode za rasterećenje pritiska kod pacijenata sa ranama od ležanja/ dekubitusom. Vodite računa da proizvod bude odgovarajući za pacijentovo okruženje. Osigurajte neprekidan tretman.

SKLADIŠTENJE, RUKOVANJE, TRANSPORT

- Po mogućnosti na ravnoj površini. Ne izlažite u blizini jačeg izvora toplote.

- Obavezno skladištiti na suvom mestu sa umerenom temperaturom, zaštitom od toplote i svetlosti u zaštitnoj vreći.

- Pažljivo rukujte proizvodom da ne biste oštetili navlaku.

- Transportujte u vreći za transport ili u kutiji proizvoda.

Za svako rukovanje / transport sledite ova uputstva.

MERE OPREZA PRI UPOTREBI

- Nemojte koristiti bez navlake.

- Nemojte stavljati strano telo između pacijenta i proizvoda, osim odeće.

- Pazite da ne oštetite navlaku. Uočena su česta pogoršanja kvaliteta zbog: progorelih mesta od cigareta, ogrebotine zbog kućnih ljubimaca, rupice od igala, posekotine skalpelom ili oštrim predmetima, oštećenja nastala upotrebom opreme sa oštrim ivicama.

- Preporučujemo da obezbedite dodatnu zaštitnu navlaku.

- Nemojte koristiti rezervne navlake, pribore ili delove osim onih koje SYSTAM® isporučuje.

- Pogledajte uputstva „Čišćenje i dezinfekcija“.

- Ako primetite dotrajalost proizvoda (deformacija pene ili curenje) ili efekat savijanja, obratite se svom dobavljaču.

- Držati dalje od zapaljivih izvora.

- Ako primetite bilo kakav neuobičajen slučaj kao što su bol, crvenilo ili izbeljivanje na tačkama oslonca, prijavite to svom negovatelju što je pre moguće.

- Proizvođač ili lokalni nadležni organ treba da budu obavesteni o bilo kakvoj ozbiljnoj nezgodi koja se dogodi u vezi sa proizvodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Materijal za jastuk od mikrokuglice: mikrokuglice od finog ekspaniranog polistirena (PS).

Materijal za jastuk od vlakana: vlakna od poliestera (PES).

Materijal za unutrašnjost: 100% pamuk.

Materijal za navlake:

POLYMAILLE® obloga od poliuretana na finoj tkanini.

OČEKIVANI VEK TRAJANJA

Vek trajanja ovih proizvoda je 5 godina kada se striktno koriste u skladu sa uputstvima za negu i održavanje. Rok upotrebe može biti duži ako se proizvod pažljivo održava, a rok je znatno kraći ako se ekstremno i nepravilno koristi. To ne predstavlja dodatnu garanciju za ove proizvode.

GARANCIJA

Dve godine u slučaju fabričkih grešaka, od datuma kupovine od strance kupca. Male nepravilnosti (male pukotine, prošaranost, površinski nedostaci itd) zbog proizvodnog procesa ni na koji način ne utiču na kvalitet i efikasnost proizvoda i ne mogu biti razlog za zamenu proizvoda po osnovu garancije. Garancija ne pokriva pogrešnu upotrebu nosača, uobičajena trošenja i habanja proizvoda ili njegovih navlaka. U slučaju oštećenja, obratite se svom dobavljaču i dajte mu serijski broj proizvoda.

BEZBEDNOSTI OKOLINA

Nemojte paliti ili bacati na deponiju. Pošaljite proces recikliranja koji je na snazi u vašoj zemlji. Nemojte gutati. Pena sa 0% hlorofluorokarbonata (CFC). U skladu sa standardima protivpožarne zaštite EN 597-1 i 597-2.

SYSTAM

CE

MD P9700B, P9701B, P9702B, P9703B, P9704B, P9705B, P9707B, P9708B, P9709B, P9710B, P9711B, P9712B, P9714B, P9750F, P9751F, P9752F, P9753F, P9754F, P9755F, P9757F, P9758F, P9759F, P9760F, P9761F, P9762F, P9763F, P9764F



SR

Pomoćna sredstva za podešavanje položaja sa mikrokuglicama / vlaknima
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer u RS:
Ortopedija – Novi Život doo, Ustanička 234A, Beograd
Tel. Maloprodaja: 011/7621-952, Veleprodaja i servis: 011/7621-953
Email: info@ortopedija.co.rs
www.ortopedija-novizivot.co.rs
Broj rešenja 515-02-03894-23-002 od 03.10.2023.

SYSTAM

SYSTEM ASSISTANCE MEDICAL SAS
ZAE - Route de Casseneuil - LE LEDAT
47300 VILLENEUVE SUR LOT - FRANCE
Tel. commercial : 05 53 40 23 50 - Fax commercial : 05 53 40 50 40
International phone + 33 553 40 50 30 - International fax + 33 553 40 58 38
www.system.com
Siret: 592 011 700 00015 - APE 331 B - FR 12 992 011 920

©SYSTAM®
08/2022
49540V2

REF P9700B1HW 0,30 kg - 0,65 lbs		REF P9750F1HW 0,23 kg - 0,50 lbs	45 x 30 cm 17,7" x 11,8"	
REF P9701B1HW 0,60 kg - 1,3 lbs		REF P9751F1HW 0,60 kg - 1,3 lbs	56 x 40 cm 22" x 15"	
REF P9702B1HW 0,60 kg - 1,3 lbs		REF P9752F1HW 0,68 kg - 1,5 lbs	60 x 20 cm 23" x 7"	
REF P9703B1HW 0,45 kg - 1 lbs		REF P9753F1HW 0,42 kg - 0,9 lbs	62 x 32 cm 24" x 12,4"	
REF P9704B1HW 0,45 kg - 1 lbs		REF P9754F1HW 0,53 kg - 1,1 lbs	50 x 50 cm 19" x 19"	
REF P9705B1HW 2,1 kg - 4,5 lbs		REF P9755F1HW 1,8 kg - 3,9 lbs	135 x 85 cm 52,5" x 33"	
REF P9708B1HW P9706B : 0,70 kg - 1,5 lbs + P9705B : 2,1 kg - 4,5 lbs		REF P9758F1HW P9706F : 0,73 kg - 1,6 lbs + P9705F : 1,8 kg - 3,9 lbs	P9706F : 58 x 40 cm - 22,5" x 15" + P9705F : 135 x 85 cm - 52,5" x 33"	
REF P9707B1HW 1,80 kg - 4 lbs		REF P9757F1HW 2,10 kg - 4,6 lbs	180 x 55 cm 71" x 21,6"	
REF P9709B1HW 0,85 kg - 1,85 lbs		REF P9759F1HW 0,79 kg - 1,74 lbs	85 x 25 cm 33" x 10"	
REF P9710B1HW 1,25 kg - 2,75 lbs		REF P9760F1HW 0,90 kg - 1,98 lbs	60 x 40 cm 23,6" x 15,7"	
REF P9711B1HW 0,33 kg - 0,72 lbs		REF P97161F1HW 0,26 kg - 0,57 lbs	30 x 10-30 cm 12" x 4-12"	
REF P9712B1HW 0,31 kg - 0,68 lbs		REF P9762F1HW 0,30 kg - 0,66 lbs	46 x 30 cm 18" x 12"	
		REF P9763F1HW 0,75 kg - 1,65 lbs	50 x 38 cm 19,7" x 15"	
REF P9714B1HW 0,13 kg - 0,28 lbs		REF P9764F1HW 0,10 kg - 0,22 lbs	30 x 20 cm 11,8" x 7,8"	