

Medicinska sredstva klase 1 u skladu sa Uredbom Evropske unije o medicinskim sredstvima (MDR) 2017/745.

Ovi proizvodi su namenjeni za rukovanje od strane bilo koje osobe koja može da pročita i razume uputstvo za upotrebu. Profil pacijenta: Bilo koji pacijent čija patologija zahteva upotrebu uređaja za prevenciju i/ili lečenje dekubitusa.

Profil operatera za instalaciju, implementaciju, prilagođavanje i održavanje: pacijent, zdravstveni radnici, tehničari za održavanje, treća strana.

Nema posebnih ograničenja za rukovanje i upotrebu **NAMENJENA PROIZVODA**

Pomoćna sredstva za podešavanje položaja u krevetu i/ili pomoćna sredstva za prevenciju i lečenje rana od ležanja/dekubitusa.

INDIKACIJE

Pogledajte indikacije o svakom artiklu. Izbor proizvoda mora da odobri zdravstveni radnik. Izbor proizvoda mora da odobri zdravstveni radnik.

USLOVI KORIŠĆENJA

Proizvodi sa integrisanom POLYMAILLE® / POLYMAILLE®HD navlakom mogu da se koriste za jednog ili više pacijenata. Mogu se obnoviti u skladu sa uputstvom za upotrebu proizvoda i uputstvima za čišćenje i dezinfekciju.

Prva preventivna mera protiv rana od ležanja: telo treba podizati što je češće moguće kako bi se ograničio pritisak na krvne sudove, čime se omogućava pravilna cirkulacija krvi.

KONTRAINDIKACIJE

Nemojte koristiti ovaj proizvod izvan predviđene upotrebe i indikacija. Nemojte ga koristiti ako ste alergični na poliuretana. Ako imate bilo kakvih problema, obratite se svom pružaocu zdravstvene zaštite.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nema neželjenih dejstava. Međutim, pacijent može osetiti dejstva svojstvena za uranjanje: moguće (ograničeno) smanjenje osećaja i pokretljivosti. Povećana osetljivost na toplotu.

PERFORMANSE PROIZVODA

Omoгуčava rasterećenje nosećih oblasti pomoću uranjanja ili oslobađanja opterećenja.

KLINIČKA KORIST

Poboljšava protok kiseonika do tkiva u zoni kontakta.

INFORMACIJE NAMENJENE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Koristite pomoćna sredstva za podešavanje položaja ili proizvode za rasterećenje pritiska kod pacijenata sa ranama od ležanja/ dekubitusom. Vodite računa da proizvod bude odgovarajući za pacijentovo okruženje. Osigurajte neprekidan tretman.

SKLADIŠTENJE, RUKOVANJE, TRANSPORT

- Po mogućnosti na ravnoj površini. Ne izlažite u blizini jačeg izvora toplote.
- Obavezno skladištiti na suvom mestu sa umerenom temperaturom, zaštićenom od toplote i svetlosti u zaštitnoj vreći.
- Pažljivo rukujte proizvodom da ne biste oštetili navlaku.

- Transportujte u vreći za transport ili u kutiji proizvoda. Za svako rukovanje / transport sledite ova uputstva.

MERE OPREZA PRI UPOTREBI

- Nemojte koristiti bez navlake.
- Nemojte stavljati strano telo između pacijenta i proizvoda, osim odeće.
- Pazite da ne oštetite navlaku. Uočena su česta pogoršanja kvaliteta zbog: progorelih mesta od cigareta, ogrebotine zbog kućnih ljubimaca, rupice od igala, posekotine skalpelom ili oštrim predmetima, oštećenja nastala upotrebom opreme sa oštrim ivicama.
- Preporučujemo da obezbedite dodatnu zaštitnu navlaku.
- Nemojte koristiti rezervne navlake, pribore ili delove osim onih koje SYST'AM® isporučuje.
- Pogledajte uputstva „Čišćenje i dezinfekcija“.
- Ako primetite dotrajalost proizvoda (deformacija pene ili curenje) ili efekat savijanja, obratite se svom dobavljaču.
- Držati dalje od zapaljivih izvora.
- Ako primetite bilo kakav neuobičajen slučaj kao što su bol, crvenilo ili izbeljivanje na tačkama oslonca, prijavite to svom negovatelju što je pre moguće.
- Proizvođač ili lokalni nadležni organ treba da budu obavešteni o bilo kakvoj ozbiljnoj nezgodi koja se dogodi u vezi sa proizvodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Materijali za jastuk:

P901T, P902T, P903T, P904T, P906T: viskozno elastična poliuretanska (PU) pena.

P905T: viskoelastična poliuretanska pena (PU).

Materijal za navlaku:

POLYMAILLE®: obloga od poliuretana na finoj tkanini.

OČEKIVANI VEK TRAJANJA

Vek trajanja ovih proizvoda je 5 godina kada se striktno koriste u skladu sa uputstvima za negu i održavanje. Rok upotrebe može biti duži ako se proizvod pažljivo održava, a rok je znatno kraći ako se ekstremno i nepravilno koristi. To ne predstavlja dodatnu garanciju za ove proizvode.

GARANCIJA

Dve godine u slučaju fabričkih grešaka, od datuma kupovine od strane kupca. Male nepravilnosti (male pukotine, prošaranost, površinski nedostaci itd) zbog proizvodnog procesa ni na koji način ne utiče na kvalitet i efikasnost proizvoda i ne mogu biti razlog za zamenu proizvoda po osnovu garancije. Garancija ne pokriva pogrešnu upotrebu nosača, uobičajena trošenja i habanja proizvoda ili njegovih navlaka. U slučaju oštećenja, obratite se svom dobavljaču i dajte mu serijski broj proizvoda.

BEZBEDNOST I OKOLINA

Nemojte paliti ili bacati na deponiju. Poštujte proces recikliranja koji je na snazi u vašoj zemlji. Nemojte gutati. Pena sa 0% hlorofluorokarbonata (CFC). U skladu sa standardima protivpožarne zaštite EN 597-1 i 597-2.

 SYST'AM®

CE

MD P901T, P902T, P903T,
P904T, P905T, P906T



SR

Uređaji za podešavanje položaja
UPUTSTVO ZA UPOTREBU


Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer u RS:
Ortopedija – Novi život doo, Ustanička 234A, Beograd
Tel. Maloprodaja: 011/7621-952, Veleprodaja i servis: 011/7621-953
Email: info@ortopedija.co.rs
www.ortopedija-novizivot.co.rs
Broj rešenja 515-02-03894-23-003 od 03.10.2023.

 SYST'AM®


SYSTEM ASSISTANCE MEDICAL SAS
ZAE - Route de Casseneuil - LE
LEDAT 47300 VILLENEUVE SUR LOT
- FRANCE

Tel. commercial : 05 53 40 23 50 - Fax commercial : 05 53 40 50 40
International phone + 33 553 40 50 30 - International fax + 33 553 40 58 38
www.system.com
Siret : 392 011 920 00015 - APE 331 B - FR 12 392 011 920

© SYST'AM®
08/2022
4952DV2

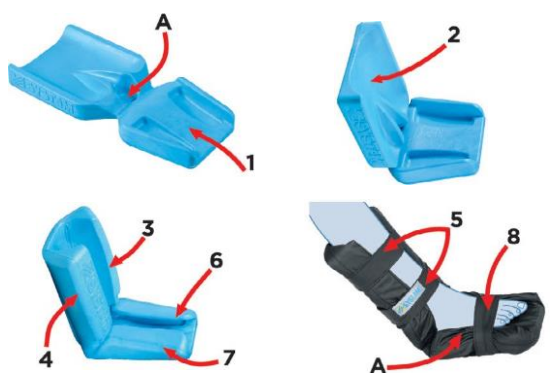

0,63 kg - 1,4 lbs
D : 55 cm - 22"
d : 250 cm - 10"
H : 7,5 cm - 3"


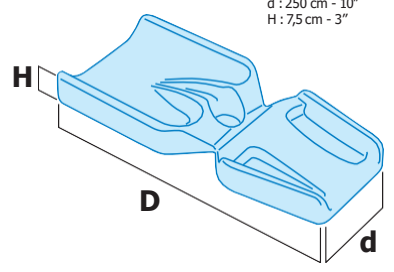


OKRUGLA POTPORA ZA PETU ZA SPRJEČAVANJE OPANKA

Indikacije: Prevencija i liječenje rana pod pritiskom (u fazi 2) na području peta. Pacijent ima normalnu ili blago ograničenu pokretljivost donjih udova.

Upute za ugradnju:

- Postavite potporu za petu tako da se peta osloni na šuplju zonu A i stopalo na dio 1(kraći dio).
- Presavijte dio 2 preko teleta, preklopite rubove 3 i 4 i pričvrstite ih trakama (5).
- Preklopite rubove 6 i 7 oko stopala i pričvrstite ih remenom 8.

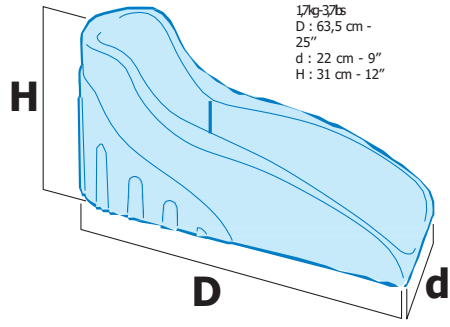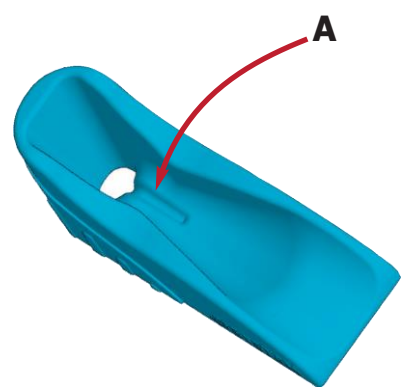

1,7kg-3,7lbs
D : 63,5 cm - 25"
d : 22 cm - 9"
H : 31 cm - 12"

POTPORA ZA PETU KAKO BI SE SPRJEČIO POLOŽAJ EKVINUSA S POTPUNIM RASTEREĆENJEM PRITISKA

Indikacije:

Prevencija i liječenje rana pod pritiskom pomažu u području pakla s potpunim rasterećenjem i položajem protiv ekvinusa. Nema pokretljivosti donjih udova.

Upute za ugradnju:

Postavite potporu za petu ispod pacijentove noge, a peta mora počivati u šupljoj zoni A.

REF P902T1HW




Sl. 1



Sl. 2

REF P904T1HW

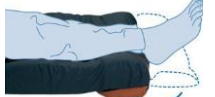


REF P906T1HW




REF P905T1HW



P902T1HW

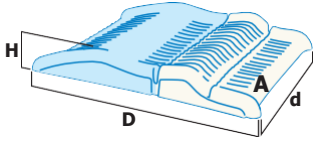

P904T1HW

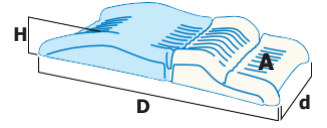

PODLOGA ZA PETE ZA UPOTREBU NA KREVTU ZA UKLANJANJE PRITISKA S PETA

Indikacije:

Prevencija i liječenje rana pod pritiskom pomažu u području pakla uz potpuno ili djelomično smanjenje pritiska.

Djelomičan ili potpuni gubitak pokretljivosti donjih udova.

Upute za ugradnju:

- Sl. 1: Stopala u položaju za rasterećenje djelomičnog pritiska. pazite da su pete postavljene u šupljem području.
- Sl. 2: U položaju za rasterećenje ukupnog pritiska. pazite da su pete postavljene u šupljem području.

P902T1HW	P904T1HW	P906T1HW
3,25 kg - 7,1 lbs	1,7 kg - 3,7 lbs	1,7 kg - 3,7 lbs
D : 73 cm - 29"	73 cm - 29"	73 cm - 29"
d : 64 cm - 25"	32,5 cm - 13"	64 cm - 25"
H : 10,5 cm - 4"	10,5 cm - 4"	25,5 cm - 10"

BLOK ZA UVLAČENJE POLU -KOPAČA


Indikacija:

Blok za uvlačenje koristi se kao dopuna SYST'AM® potpornjacima za pete za uvlačenje u položaju poluprtičara. Smanjuje «prednje klizanje» i sprječava posljedice trenja i rezanja na križnici.

Ovaj sistem doprinosi rasterećenju zona sakruma, ishiuma i pete prebacivanjem pritiska u zone sa manjim rizikom (bedra, listovi, leđa).

Upute za ugradnju:

Postavite blok za uvlačenje ispod nogu pacijenta, pazite da se poštuje smjer upotrebe. Da biste to učinili, upotrijebite oznaku markera (usp. Sl.1 = slika naljepnice).

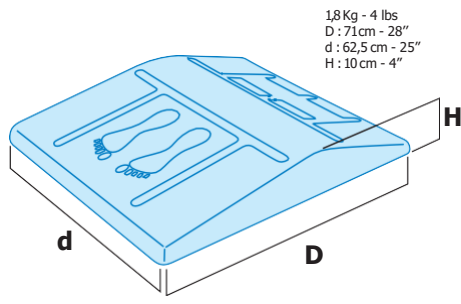

1,8 Kg - 4 lbs
D : 71 cm - 28"
d : 62,5 cm - 25"
H : 10 cm - 4"