

UPUTSTVO EASY-SLIDE POZICIONER ZA ČARAPE

UVOD


Easy-Slide pruža efikasna rešenja za navlačenje i svlačenje kompresivnih čarapa. Vaš novi Easy-Slide se odlikuje visokim stepenom efikasnosti, komfora i kvaliteta. Easy-Slide je dizajniran tako da rešava probleme kao što su oštećene čarape ili istegnuti mišići. Easy-Slide je korisno pomagalo ne samo za osobu koja nosi čarape, već i za njenog stručnog negovatelja. Da biste se uverili da Easy-Slide koristite na najbolji mogući način, pažljivo pročitajte priložene podatke o proizvodu. Ako imate pitanja, obratite se prodavcu.

PREDNOSTI/KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Smanjuje fizičko naprezanje kako negovatelja, tako i osobe koja nosi čarape
- Povećava nezavisnost
- Povećava usaglašenost sa terapijom
- Čarape duže zadržavaju kompresivno terapijsko dejstvo
- Easy-Slide je napravljen od inovativnog glatkog i laganog materijala. Koristite Easy-Slide na jednom pacijentu. Ako Easy-Slide treba koristiti na više pacijenata, očistite proizvod rastvorom sa 70% etanola.

NAČIN UPOTREBE


1. Navucite Easy-Slide preko stopala

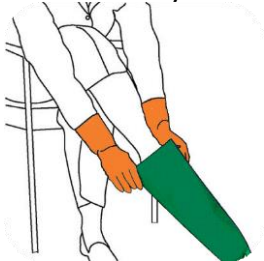

2. Navucite čarapu preko Easy-Slide-a



3. Povucite čarapu preko pete

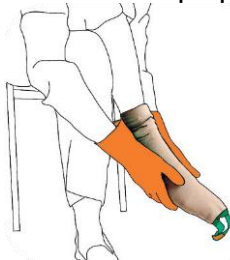

4. Jednu ruku čvrsto postavite na petu, a drugom povucite dršku Easy-Slide-a



5. Izvucite Easy-Slide laganim pokretima



VELIČINE

Veličina	S	M	L	XL
Broj obuće	<=34-37	38-41	42-45	>=46

UPUTSTVO ZA PRANJE

- Easy-Slide možete prati isključivo ručno, na niskoj temperaturi (30°C)
- Sušite proizvod isključivo peškirom i nikada ga nemojte peglati
- Nemojte hemijski čistiti niti tretirati izbeljivačem
- Ne izlažite proizvod izvorima toplote poput direktne sunčeve svetlosti, grejalice ili centralnog grejanja

VAŽNO!

- Upozorenje! Nemojte gaziti na Easy-Slide: izrađen je od izuzetno klizavog materijala te predstavlja opasnost od klizanja.
- Pri upotrebi Easy-Slide-a važno je da koristite odgovarajuću veličinu. Ako koristite neodgovarajuću veličinu, proizvod neće pravilno funkcionisati i moguće je njegovo oštećenje ili prebrzo habanje. Odgovarajuća veličina se utvrđuje na osnovu broja cipela koji nosite.
- Nosite specijalne gumene rukavice pri upotrebi Easy-Slide-a. Time se postiže maksimalno prianjanje čarape i umanjuje se potrebna fizička snaga.
- Ovaj proizvod podleže garanciji u trajanju od šest meseci od datuma kupovine koja pokriva defekte usled neispravnog materijala ili izrade.

Tokom trajanja garantnog roka, proizvod će biti besplatno zamenjen u slučaju proizvodnih i/ili defekata u materijalu.

Zamena pod garancijom će biti izvršena samo ukoliko se potvrdom o kupovini može dokazati da datum podnošenja reklamacije pada u okviru garantnog roka.

Da biste koristili ovu uslugu, morate da se obratite svom Easy-Slide dobavljaču. Potrebno je da proizvod vratite opran u skladu sa uputstvom za pranje.

MEDICINSKI UREĐAJ

Namena: Olakšava navlačenje i svlačenje medicinskih kompresivnih čarapa.

Napomena: Sve ozbiljne incidente do kojih je došlo prilikom upotrebe proizvoda treba prijaviti proizvođaču i nadležnom nadzornom organu.

PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list.

Uz prigovor se **OBAVEZNO** podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda ili povraćaj plaćenog iznosa samo ukoliko proizvod nije korišćen, nije oštećen ni na koji način i u originalnom je pakovanju. Prodavac će detaljno pregledati proizvod i utvrditi ispunjenost svih uslova za prihvatanje prigovora.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom.

Proizvođač: ARION, Holandija
Glavni i ekskluzivni distributer:
ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT, Beograd
Ustanička 234A
Tel: 011/7621-953
e-mail: info@rtopedija.co.rs
<http://www.ortopedija-novizivot.co.rs>