


UPUTSTVO ZA UPOTREBU
TOALETNE STOLICE

Dragi korisniče,

Hvala vam što koristite naše proizvode. Molimo pročitajte ovo uputstvo da biste dobro upoznali naše proizvode pre upotrebe.

1. Proverite da toaletna stolica nije slučajno oštećena.
2. Podesite sedište na odgovarajuću visinu za osobu koja koristi toaletnu stolicu za osobu. Generalno, stopala treba da budu ravna sa tlom, sa koljenima tik iznad visine kukova dok sede.
VAŽNO! Ne podešavajte visinu stolice kada neko sedi na njoj.
 - Podignite poklopac stolice.
 - Ako se ram koristi preko postojećeg toaleta, uklonite sve posude.
 - Podignite WC dasku i stavite ram stolice preko nje.
 - Možda ćete morati da uklonite postojeću WC dasku da biste omogućili da ram iznad toaleta bude postavljen što bliže WC šolji.
3. Nemojte se penjati na toaletnu stolicu.
4. Toaletna stolica se sme koristiti samo na stabilnoj površini, samo u zatvorenom prostoru.
5. Toaletna stolica je izrađena od aluminijuma, četiri gume, naslona za ruke i PVC posude.
6. Nečistoća na metalnim i plastičnim delovima može se ukloniti standardnim sredstvima za čišćenje.
7. Rok trajanja nije primenljiv za ova medicinska pomagala.
8. Čuvajte na suvom mestu.

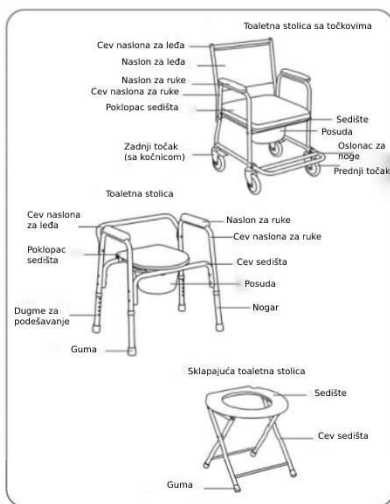


Informacije o proizvođaču i evropskom predstavniku:



FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD

Pingnan industrial Zone, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

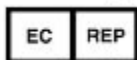

SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands

NAPOMENA!

OVO JE PROIZVOD KOJI PRIPADA GRUPI MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA DOLAZE U DIREKTAN DODIR SA KOŽOM I INTIMNIM DELOVIMA TELA.

IZ HIGIJENSKIH RAZLOGA I RADI ZAŠTITE NAŠIH KUPACA, OVO POMAGALO SE NAKON KUPOVINE NE MOŽE VRATITI NITI MENJATI.

REKLAMACIJE NA OVO POMAGALO SE PRIHVATAJU ISKLJUČIVO U SLUČAJU FABRIČKOG OŠTEĆENJA.

ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT

PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, u roku od 6 meseci od datuma kupovine.

Uz prigovor se OBAVEZNO podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda ili povraćaj plaćenog iznosa samo ukoliko proizvod nije korišćen, nije oštećen ni na koji način i u originalnom je pakovanju. Prodavac će detaljno pregledati proizvod i utvrditi ispunjenost svih uslova za prihvatanje prigovora.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom

Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer:

Ortopedija – Novi život doo, Ustanička 234A, Beograd

Tel. Maloprodaja: 011/7621-952

Veleprodaja i servis: 011/7621-953

Email: info@ortopedija.co.rs

www.ortopedija-novizivot.co.rs

Broj rešenja 515-02-01373-23-003 od 29.05.2023.