


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PODPAZUŠNE ŠTAKE

Dragi korisniče,

Hvala vam što koristite naše proizvode. Molimo pročitajte ovo uputstvo da biste dobro upoznali naše proizvode pre upotrebe.

1. Podesite podpazušne štake na odgovarajuću visinu. Metoda podešavanja: prstom pritisnite dugme za podešavanje. Proverite da li je drška labava ili ima ubod. Sprečite da vas labava ručka ugrozi i pazite da vam ubod ne povredi dlanove da biste je podesili po visini, učvrstite osigurač, onda se može koristiti.
2. Proverite da li je drška labava. Sprečite da vas olabavljena ručka povredi.
3. Maksimalna nosivost do 120 kg.
4. Proverite da li su gume protiv klizanja na štakama čvrste i stabilne. Ako su izlizane, odmah ih promenite. Obratite više pažnje kada koristite štake na kosini.
5. Podpazušne štake za hodanje su pomoć pri hodanju, nemojte ih koristiti u druge svrhe.
6. Podpazušne štake za hodanje nisu pogodne za penjanje na planine i podupiranje tela duže vreme.
7. Podpazušne štake su izrađene od aluminijuma ili drveta sa gumenim nastavcima i ručkama i PVC dodacima.
8. Rok trajanja nije primenljiv za ova medicinska pomagala.
9. Čuvanje na suvom mestu.

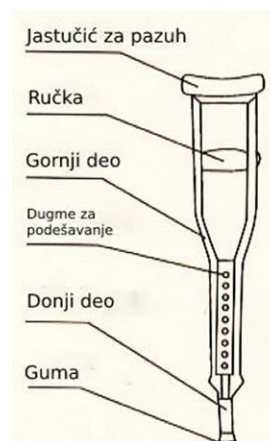


Informacije o proizvođaču i evropskom predstavniku:



FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD

Pingnan industrial Zone, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

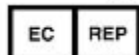

SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands

PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, u roku od 6 meseci od datuma kupovine.

Uz prigovor se **OBAVEZNO** podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda ili povraćaj plaćenog iznosa samo ukoliko proizvod nije korišćen, nije oštećen ni na koji način i u originalnom je pakovanju. Prodavac će detaljno pregledati proizvod i utvrditi ispunjenost svih uslova za prihvatanje prigovora.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom

Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer:

Ortopedija – Novi život doo, Ustanička 234A, Beograd

Tel. Maloprodaja: 011/7621-952

Veleprodaja i servis: 011/7621-953

Email: info@ortopedija.co.rs

www.ortopedija-novizivot.co.rs

Broj rešenja 515-02-01373-23-003 od 29.05.2023.